

# CURAPAX®

## GEBRAUCHSANWEISUNG



Vor dem Gebrauch immer zuerst die Gebrauchsanleitung lesen



Kissen mit Wasser füllen



Das Kissen umdrehen, Kopf nach unten, und sanft schütteln



Im Mikrowellengerät erwärmen



Wenn die Temperaturanzeige auf "Rot" steht, kann es sein, dass das Kissen für den Gebrauch zu heiß ist

### WÄRMEPACKUNG:

1. Die Packung vollständig mit kaltem/lauwarmem Wasser füllen.
2. Die Packung umdrehen, um das Einfüllventil zu versiegeln. Überschüssiges Wasser vom Ventil entfernen.
3. Die Packung im Mikrowellenherd oder Brutkasten auf die gewünschte Temperatur erhitzen.
4. Die Wärmepackung ist fertig zum Gebrauch. Sie können die Packung leicht massieren, um das warme Gel gleichmäßig zu verteilen.

### KÜHLPACKUNG:

1. Die Packung vollständig mit kaltem/lauwarmem Wasser füllen.
2. Die Packung umdrehen, um das Einfüllventil zu versiegeln. Überschüssiges Wasser vom Ventil entfernen.
3. Die Packung im Kühlschrank auf die gewünschte Temperatur abkühlen (1 bis 2 Stunden).
4. Die Kühlpackung ist fertig zum Gebrauch. Sie können die Packung leicht massieren, um das kalte Gel gleichmäßig zu verteilen.

### SOFORT-WÄRMEPACKUNG:

1. Die Packung vollständig mit warmem Wasser der gewünschten Temperatur füllen.
2. Die Packung umdrehen, um das Einfüllventil zu versiegeln. Überschüssiges Wasser vom Ventil entfernen.
3. Die Wärmepackung ist fertig zum Gebrauch. Sie können die Packung leicht massieren, um das warme Gel gleichmäßig zu verteilen.

### SOFORT-KÜHLPACKUNG:

1. Die Packung vollständig mit kaltem Wasser oder Eiswasser füllen.
2. Die Packung umdrehen, um das Einfüllventil zu versiegeln. Überschüssiges Wasser vom Ventil entfernen.
3. Die Kühlpackung ist fertig zum Gebrauch. Sie können die Packung leicht massieren, um das kalte Gel gleichmäßig zu verteilen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

Wenn das Einfüllventil nicht vollständig leer ist, kann eine kleine Menge Wasser/Gel austreten. Eine überhitzte Packung kann platzen - die Packung vorsichtig aus der Mikrowelle / dem Brutkasten herausnehmen. Die Temperatur der Packung kann nach dem Beenden des Erwärmens noch leicht weiter steigen. Da ein erhöhtes Risiko besteht, wenn die Temperatur 45 ° Celsius erreicht hat, färbt sich eine Wärmeanzeige rot. Die Wärmeanzeige ist ausschließlich eine zusätzliche optische Vorsorgemaßnahme gegen Verletzungen beim Gebrauch. Das Kissen und das Gel können für den gewünschten Zweck zu warm sein - selbst wenn die Temperaturanzeige nicht "rot" anzeigt. Handhaben Sie das Kissen zu jeder Zeit mit Vorsicht. Ein zu heißes oder ein zu kaltes Kissen kann zu Verletzungen der Haut und des darunter liegenden Gewebes führen. Seien Sie besonders vorsichtig bei Patienten, deren Sensitivität reduziert ist. Menschen, die an Diabetes leiden und solche mit schwachem Kreislauf sollten Wärmetherapie nur nach Konsultation eines Arztes anwenden. Bei Kindern, älteren Menschen und bei schwangeren Frauen kann die Haut besonders sensibel sein, deshalb wird zu Überwachung geraten. Die Packung ist AUSSCHLIESSLICH für den äußeren Gebrauch bestimmt. Wenn die Packung beschädigt ist, ist sie sofort zu entsorgen.

### EMPFEHLUNGEN:

Die Mikrowellengeräte funktionieren unterschiedlich. Deshalb empfehlen wir, die Mikrowelle jeweils nur für ca. 20 Sekunden einzustellen, bis Sie ein besseres Gefühl dafür gewonnen haben, wann das Produkt in Ihrem speziellen Mikrowellengerät die gewünschte Temperatur erreicht hat.

### CURAPAX® ENTHÄLT:

PE, PA, PP und superabsorbierendes Polymer (SAP). CURAPAX ist sowohl PVC- als auch Latex-frei. Das entstehende Gel ist ungiftig, risikofrei und in Salzwasser löslich. Vermeiden Sie es, das Gel zu schlucken. Sollte das Gel verschluckt worden sein, ist ein Arzt hinzuzuziehen. CURAPAX® ist ein ungiftiges Einweg-Produkt, das mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden kann.