
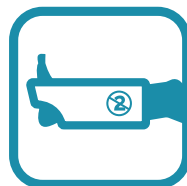


# DECUHEEL™

THE CURE IS CARE

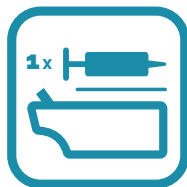

Decumed ApS • Skeltoftevej 73 • DK-2800 Kgs. Lyngby • +45 4016 8632 • sb@decumed.com

[WWW.DECUMED.COM](http://WWW.DECUMED.COM)

Version 082014





### Decuheel oppustelig patientspecifik hælløfter

- Hælløfteren må kun anvendes til forebyggelse af hælsår, i forbindelse med behandling af hælsår og til elevation af hæl. Fold hælløfteren ud. Indfør pumpespidsen i den selvlukkende ventil. Pump hælløfteren 3/4 op, ikke mere. Hælløfteren må ikke være fuldt oppustet, da den så bliver hård til skade for patienten og fordi den kan blive beskadiget. Hælløfteren er nu klar til anvendelse. Anbring patientens fod i den oppustede hælløfter.
- Fodsålen skal hvile mod den del, der er markeret med en tegnet fod på hælløfteren. Læggen skal bæres af den store luftfyldte del i bunden.
- Hælen skal være løftet over underlaget (madrassen). Juster lufttrykket så den korrekte løftehøjde af hælen opnås (1-2 cm), dette kan ske mens patientens ben bliver liggende i hælløfteren.
- Trykket i hælløfteren sænkes ved hjælp af den medfølgende pind, der forsigtigt indføres i ventilen, så luft lukkes ud indtil ønsket tryk er opnået. Bændlet lukkes. OBS: Bændlet må ikke stramme.
- Før bortskaffelse kan hælløfteren punkteres, f.eks. ved afklipning af et hjørne.
- Bortskaffes som almindelig dagrenovation.
- Hælløfteren bruges direkte mod huden. Hælløfteren er patientspecifik og må ikke bruges til patient nummer 2. Ved tilsmudsning af hælløfteren skal den erstattes af en ren hælløfter.

Indeholder ikke ftalater



### ADVARSEL

- Ved for højt tryk i hælløfteren kan den bryde med højt lydtryk til følge.
- Hælløfteren må kun fyldes med atmosfærisk luft.
- Fyldning af hælløfteren med andre luftarter kan medføre brandfare.
- Hælløfteren må ikke komme i direkte kontakt med sår på grund af infektionsrisiko.
- Vedligehold altid korrekt tryk i hælløfteren. Ved manglende tryk i hælløfteren er der risiko for at tryksår kan opstå.
- Hælløfteren må kun anvendes i oppustet tilstand.
- Må ikke anvendes i nærheden af åben ild.
- Defekte hælløftere skal straks kasseres.