

# CURAPAX®

## INSTRUCCIONES



**Siempre lee las instrucciones antes del uso**



**Llena la almohadilla completamente con agua**



**Gira la almohadilla al revés de arriba abajo y sacúdela un poco**



**Calienta en el horno microondas**



**Si el indicador está rojo, la almohadilla está demasiado caliente**

### ALMOHADILLA CALIENTE:

1. Llena la almohadilla completamente con agua al clima/frio.
2. Gira la almohadilla al revés de arriba abajo para "cerrar" la válvula. Elimine el agua residual de la válvula.
3. Calienta la almohadilla en el horno microondas hasta que tenga la temperatura deseada.
4. La almohadilla esta lista para ser usada. Se puede repartir el gel aplastando la almohadilla.

### ALMOHADILLA FRÍA:

1. Llena la almohadilla completamente con agua frio/helado.
2. Gira la almohadilla al revés de arriba abajo para "cerrar" la válvula. Elimine el agua residual de la válvula.
3. Enfríe la almohadilla en la refrigeradora hasta que tenga la temperatura deseada.
4. La almohadilla esta lista para ser usada. Se puede repartir el gel aplastando la almohadilla.

### ALMOHADILLA CALIENTE INSTANTANEA

1. Llena la almohadilla completamente con agua caliente.
2. Gira la almohadilla al revés de arriba abajo para "cerrar" la válvula. Elimine el agua residual de la válvula.
3. La almohadilla esta lista para ser usada. Se puede repartir el gel aplastando la almohadilla.

### ALMOHADILLA FRÍA INSTANTANEA:

1. Llena la almohadilla completamente con agua frio/helado.
2. Gira la almohadilla al revés de arriba abajo para "cerrar" la válvula. Elimine el agua residual de la válvula.
3. La almohadilla esta lista para ser usada. Se puede repartir el gel aplastando la almohadilla.

### ATENCIÓN:

Si la válvula no ha sido vaciada completamente (paso 2) puede salir un poco de agua o gel al momento de colocar la almohadilla. CURAPAX solo debe ser calentada en horno microondas o incubadora. CURAPAX se daña y se puede romper si se las sobrecalienta. Saque cuidadosamente del horno microondas. La almohadilla puede estar más caliente que parece al primer toque. El indicador de calor se pone rojo cuando la temperatura llega a los 45 grados centigrados y hay riesgo elevado de usar el producto. El indicador de calor es un guía extra de seguridad indicador para prevenir lesiones y quemaduras. La almohadilla y el gel puede ser demasiado caliente para el uso deseado aunque el indicador de calor no está rojo. Siempre siente el calor de la almohadilla antes de colocarla y usa el sentido común. Una almohadilla demasiado caliente o fría puede ocasionar daños en la piel y en el tejido subyacente. Para diabéticos y gente con problemas cardiovasculares solo se recomienda el uso tras recomendaciones de un doctor. Recuerda que la piel de niños, ancianos y embarazadas puede ser muy sensible y por eso necesita más atención. Si la almohadilla está rota no se la puede usar y hay que colocarla en la basura.

### RECOMENDACIÓN:

Cada horno microondas es diferente. Por eso calienta CURAPAX por periodos cortos de por ejemplo 20 segundos para de esa manera tener una mejor sentido individual de cuánto tiempo necesita para obtener la temperatura deseada un su horno microondas.

### CONTENIDO EN CURAPAX®:

CURAPAX está hecho de PE, PA, PP y polímero súper absorbente (SAP). Libre de PVC y látex. El gel es no tóxico, sin riesgo para la piel y se disuelve en agua (salado). No se debe tomar el gel, si pasa hay que consultar a un médico. El gel se disuelve en agua (salada). CURAPAX es un producto respetuoso del medio ambiente que se puede colocar entre los residuos domésticos.