

CURAPAX®

EINWEG-HEIZ- UND KÜHLKISSEN

CURAPAX® CARE CONCEPT

Dieses neue und einzigartige Konzept bietet verbesserte Hygiene, verbesserte Zugänglichkeit und kürzere Behandlungszeit. Damit kommen Wärme- und Kühltherapie direkt in jede Krankenhausabteilung, die Behandlung wird einfacher und sowohl für die Patienten als auch für das Pflegepersonal komfortabler.



**JUST ADD
WATER**



Vergleichen Sie	CURAPAX	Wiederverwendbar
Hygiene bei der Anwendung	✓	-
Hygiene bei der Lagerung	✓	-
Schnelligkeit der Vorbereitung	✓	-
Anwendbarkeit direkt auf der Haut	✓	-
Raumsparende Lagerung - hygienischer Spenderkarton	✓	-
Leichter Zugriff	✓	-
Eingebaute Wärmeanzeige	✓	-

Spezifikationen	
Material	PE, PP, PA, SAP
Gewicht	22 g
Maße einzeln	250mm x 160mm
Abmessungen der Verpackungseinheit zu 50 Stück	110mm x 190mm x 285mm
Verpackung	50 Stück pro Schachtel, 200 Stück pro Karton
Latex- und PVC-frei	-

Curapax Einweg-Heiz- und -Kühlkissen mit integrierter Hülle aus Textilverbundstoff.

CURAPAX®

EINWEG-HEIZ- UND KÜHLKISSEN

- Hygienisches Einweg-Konzept zur Reduzierung von Kreuz-Kontamination
- Zeitsparende Vorbereitung und Entsorgung
- Eine sichere Lösung, sowohl für die Patienten als auch für das Personal

SCHNELLIGKEIT DER VORBEREITUNG

Das eingebaute Einwegventil macht es leicht, Wasser einzufüllen

HÖCHSTMASS AN HYGIENE

Beseitigen Sie das Risiko von Kreuzkontamination durch das Wegwerf-Konzept von CURAPAX

ZEITERSPARNIS

Gesteigerte Effizienz durch bequemes Zugreifen auf die Kissen, schnelles Aufheizen und den Wegfall jeglicher Reinigung. Die Außenhülle von CURAPAX aus Textilverbundstoff erspart das Einwickeln in ein Tuch

SICHERE ANWENDUNG

Schutz sowohl des Patienten als auch des Pflegepersonals vor Verbrennungen und Erfrierungen durch die Hülle von CURAPAX aus Textilverbundstoff

LÄNGERE BEHANDLUNGSZEIT

Längere Behandlungszeit durch die hohe Kapazität (550 ml Gel) von CURAPAX in Kombination mit der isolierenden Hülle aus Textilverbundstoff

FLEXIBILITÄT

Auf die Patienten zugeschnittene Anwendungen - wie Nacken-/Schulterpackungen - lassen sich durch Verbindung mehrerer Packungen an den Ecken-"Augen" leicht herstellen.

EINGEBAUTE WÄRMEANZEIGE

Die eingebaute Wärmeanzeige ist eine zusätzliche optische Vorbeugung gegen Schädigungen bei der Anwendung

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Wenn das Einfüllventil nicht vollständig leer ist, kann eine kleine Menge Wasser/Gel austreten. Eine überhitzte Packung kann platzen - die Packung vorsichtig aus der Mikrowelle / dem Brutkasten herausnehmen. Die Temperatur der Packung kann nach dem Beenden des Erwärmens noch leicht weiter steigen. Da ein erhöhtes Risiko besteht, wenn die Temperatur 45 ° Celsius erreicht hat, färbt sich eine Wärmeanzeige rot. Die Wärmeanzeige ist ausschließlich eine zusätzliche optische Vorsorgemaßnahme gegen Verletzungen beim Gebrauch. Das Kissen und das Gel können für den gewünschten Zweck zu warm sein - selbst wenn die Temperaturanzeige nicht "rot" anzeigt. Handhaben Sie das Kissen zu jeder Zeit mit Vorsicht. Ein zu heißes oder ein zu kaltes Kissen kann zu Verletzungen der Haut und des darunter liegenden Gewebes führen. Seien Sie besonders vorsichtig bei Patienten, deren Sensitivität reduziert ist. Menschen, die an Diabetes leiden und solche mit schwachem Kreislauf sollten Wärmetherapie nur nach Konsultation eines Arztes anwenden. Bei Kindern, älteren Menschen und bei schwangeren Frauen kann die Haut besonders sensibel sein, deshalb wird zu Überwachung geraten. Die Packung ist AUSSCHLIESSLICH für den äußeren Gebrauch bestimmt. Wenn die Packung beschädigt ist, ist sie sofort zu entsorgen.

EMPFEHLUNGEN:

Die Mikrowellengeräte funktionieren unterschiedlich. Deshalb empfehlen wir, die Mikrowelle jeweils nur für ca. 20 Sekunden einzustellen, bis Sie ein besseres Gefühl dafür gewonnen haben, wann das Produkt in Ihrem speziellen Mikrowellengerät die gewünschte Temperatur erreicht hat.