

CURAPAX®

ALMOHADILLA CALIENTE/FRÍA DESECHABLE

CURAPAX® CARE CONCEPT

Este nuevo concepto para terapia caliente/fría ofrece mejor higiene, ahorra tiempo y mejor acceso. Lleva la terapia caliente/fría a las salas de los hospitales y hace que sea más fácil, conveniente, agradable para los pacientes y el personal.



**JUST ADD
WATER**



Comparación de los productos	CURAPAX	Reutilizables
Uso higiénico	√	-
Almacenamiento higiénico	√	-
Ahorra tiempo	√	-
Uso directamente sobre la piel	√	-
Ahorra espacio – almacenamiento fácil	√	-
Fácil acceso	√	-
Indicador de calor integrado	√	-

Especificaciones	
Materiales	PE, PP, PA, SAP
Peso	22 gramos
Tamaño Curapax	250mm x 160mm
Tamaño caja de 50 unidades	110mm h x 190mm b x 285mm l
Manera de empaquetar	50/caja, 200/caja de cartón
Libre de latex, Libre de PVC, No tóxico	-

Curapax Almohadilla caliente/fría desechable con capa protector no-tejido.

CURAPAX®

ALMOHADILLA CALIENTE/FRÍA DESECHABLE

- Concepto desechable que reduce la posibilidad de contaminación cruzada.
- Ahorra tiempo en preparación y disposición
- Almacenamiento fácil, accesible e higiénico

PREPARACION RAPIDO

La válvula integrada lo hace fácil y rápido de llenar con agua.

HIGIENE ALTA

Curapax es diseñado para un solo uso y por eso elimina el riesgo de contaminación cruzada.

AHORRA TIEMPO

Curapax minimiza el uso de tiempo de colección y preparación y el espacio de almacenamiento tanto como elimina la limpieza después del uso. CURAPAX se puede usar sin usar toallas.

USO SEGURO

La capa protector no-tejido proteja tanto pacientes y enfermeras de quemaduras y congelaciones.

TRATAMIENTO PROLONGADA

Curapax contiene hasta 600 ml de gel algo que junto a la capa protector no-tejido aislante significa un efecto prolongado de calor/frío.

MUCHA FLEXIBILIDAD

Los "ojos" únicos de CURAPAX dan posibilidad de una colocación fácil con posibilidad de unir la cantidad de almohadillas deseadas.

INDICADOR DE CALOR INTEGRADO

Para una mejor seguridad de uso.

ATENCIÓN:

Si la válvula no ha sido vaciada completamente (paso 2) puede salir un poco de agua o gel al momento de colocar la almohadilla. CURAPAX solo debe ser calentada en horno microondas o incubadora. CURAPAX se daña y se puede romper si se las sobrecalienta. Saque cuidadosamente del horno microondas. La almohadilla puede estar más caliente que parece al primer toque. El indicador de calor se pone rojo cuando la temperatura llega a los 45 grados centígrados y hay riesgo elevado de usar el producto. El indicador de calor es un guía extra de seguridad indicador para prevenir lesiones y quemaduras. La almohadilla y el gel puede ser demasiado caliente para el uso deseado aunque el indicador de calor no está rojo. Siempre siente el calor de la almohadilla antes de colocarla y usa el sentido común. Una almohadilla demasiado caliente o fría puede ocasionar daños en la piel y en el tejido subyacente. Para diabéticos y gente con problemas cardiovasculares solo se recomienda el uso tras recomendaciones de un doctor. Recuerda que la piel de niños, ancianos y embarazadas puede ser muy sensible y por eso necesita más atención. Si la almohadilla está rota no se la puede usar y hay que colocarla en la basura.

RECOMENDACIÓN:

Cada horno microondas es diferente. Por eso calienta CURAPAX por periodos cortos de por ejemplo 20 segundos para de esa manera tener una mejor sentido individual de cuánto tiempo necesita para obtener la temperatura deseada un su horno microondas.

CONTENIDO EN CURAPAX®:

CURAPAX está hecho de PE, PA, PP y polímero súper absorbente (SAP). Libre de PVC y látex. El gel es no tóxico, sin riesgo para la piel y se disuelve en agua (salado). No se debe tomar el gel, si pasa hay que consultar a un médico. El gel se disuelve en agua (salada). CURAPAX es un producto respetuoso del medio ambiente que se puede colocar entre los residuos domésticos.