

CURAPAX®

KÄYTTÖOHJE



Lue aina ohjeet ennen käyttöön-ottoa



Täytä pussi vedellä



Käännä pussi ylösalaisin ja ravista varovasti



Lämmitä mikroaaltouunissa



Jos lämpötunnistin näyttää punaista, saattaa pussi olla liian kuuma käytettäväksi

LÄMPÖPAKKAUS:

1. Täytä pakkaus täyteen kylmällä/haalealla vedellä.
2. Käännä pakkaus ylösalaisin sulkeaksesi takaiskuventtiili. Poista ylimääräinen vesi venttiilistä.
3. Lämmitä pakkaus mikrossa tai keskoskaapissa haluttuun lämpötilaan.
4. Lämpöpakkaus on valmis käyttöön. Voit kevyesti puristella pakkausta, jotta lämmin geeli sekoittuu tasaisesti joka puolelle.

KYLMÄPAKKAUS:

1. Täytä pakkaus täyteen kylmällä/haalealla vedellä.
2. Käännä pakkaus ylösalaisin sulkeaksesi takaiskuventtiili. Poista ylimääräinen vesi venttiilistä.
3. Viilennä pakkaus jääkaapissa (1 - 2 tuntia) haluttuun lämpötilaan.
4. Kylmäpakkaus on valmis käyttöön. Voit kevyesti puristella pakkausta, jotta kylmä geeli sekoittuu tasaisesti joka puolelle.

HETI VALMIS LÄMPÖPAKKAUS:

1. Täytä pakkaus täyteen halutun lämpöisellä vedellä.
2. Käännä pakkaus ylösalaisin sulkeaksesi takaiskuventtiili. Poista ylimääräinen vesi venttiilistä.
3. Lämpöpakkaus on heti valmis käyttöön. Voit kevyesti puristella pakkausta, jotta lämmin geeli sekoittuu tasaisesti joka puolelle.

HETI VALMIS KYLMÄPAKKAUS:

1. Täytä pakkaus täyteen kylmällä tai jääkylmällä vedellä.
2. Käännä pakkaus ylösalaisin sulkeaksesi takaiskuventtiili. Poista ylimääräinen vesi venttiilistä.
3. Kylmäpakkaus on heti valmis käyttöön. Voit kevyesti puristella pakkausta, jotta kylmä geeli sekoittuu tasaisesti joka puolelle.

HUOMIOITAVAA:

Jos takaiskuventtiili ei ole kunnolla tyhjenetty pieni määrä vettä/geeliä voi valua ulos. Ylikuumennettu pakkaus voi purskahtaa ulos - ole varovainen, kun otat pakkauksen mikrosta/inkubaattorista. Pakkauksen lämpötila voi hiukan nousta vielä lämmittämisen lopettamisen jälkeenkin. Koska on olemassa suuri mahdollisuus, että tuotetta käytetään, kun sen lämpötila on saavuttanut 45 °C, lämpöindikaattori muuttuu punaiseksi. Lämpöindikaattori on ainoastaan ylimääräinen ohjeellinen varoimenpide vahinkojen ehkäisemiseksi. Pakkaus tai geeli voi olla liian kuuma käyttökohteeseen - vaikka indikaattori ei ole muuttunutkaan punaiseksi. Muista käsitellä pakkausta aina huolellisesti. Pakkaus, joka on liian kuuma tai kylmä voi johtaa ihon tai sen alapuolisten kudosten vahingoittumiseen. Kiinnitettävä erityistä huomiota hoidettaessa potilaita, joilla on heikentynyt tuntoaisti. Diabeetikot ja potilaat, joilla on huonontunut verenkierto tulisi olla yhteydessä lääkäriin ennen lämpöhoidon aloittamista. Huomioi, että lasten, vanhusten ja raskaana olevien iho ovat erityisen herkkiä ja vaativat siksi valvontaa. Pakkaus on AINOASTAAN ulkoiseen käyttöön. Vahingoittunut pakkaus on hävitettävä välittömästi.

SUOSITUS:

Jokainen mikroaaltouuni toimii erilailla. Siksi suosittelemme, että CURAPAXia lämmitetään esim. 20 sekuntia kerralla kunnes saavutetaan halutun lämpöinen tuote juuri nimenomaisessa mikrossa.

CURAPAX® SISÄLTÄÄ:

PE, PA, PP ja erittäin imukykyistä polymeeriä (SAP). CURAPAX on sekä PVC vapaa että lateksiton. Geeli on myrkytön, ihoystävällinen ja liukenee suolaveteen. Geelin nauttimista tulee välttää. Jos geeliä on nautittu, tulee ottaa yhteys lääkäriin. CURAPAX® on myrkytön, kertakäyttöinen, joka voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.