

CURAPAX®

GEBRUIKSAANWIJZING



Lees voor gebruik altijd de instructies



Vul het kussen met water



Keer het kussen ondersteboven en schudt het licht



Verwarmen in een magnetronoven



Als de indicator rood wordt, kan het kussen te heet zijn voor gebruik

WARMTEKOMPRES:

1. Vul het kompres volledig met koud/lauw water.
2. Keer het kompres ondersteboven om de inlaatklep af te sluiten. Verwijder overtollig water van de klep.
3. Verwarm het kompres in een magnetron of incubator tot de gewenste temperatuur is bereikt.
4. Het warmtekompres is klaar voor gebruik. U kunt het kompres lichtjes masseren om de warme gel te verdelen.

KOUDEKOMPRES:

1. Vul het kompres volledig met koud/lauw water.
2. Keer het kompres ondersteboven om de inlaatklep af te sluiten. Verwijder overtollig water van de klep.
3. Koel het kompres in een koelkast (1 tot 2 uur) tot de gewenste temperatuur is bereikt.
4. Het koudekompres is klaar voor gebruik. U kunt het kompres lichtjes masseren om de koude gel te verdelen.

INSTANT WARMTEKOMPRES:

1. Vul het kompres volledig met warm water op de gewenste temperatuur.
2. Keer het kompres ondersteboven om de inlaatklep af te sluiten. Verwijder overtollig water van de klep.
3. Het warmtekompres is klaar voor gebruik. U kunt het kompres lichtjes masseren om de warme gel te verdelen.

INSTANT KOUDEKOMPRES:

1. Vul het kompres volledig met koud water of ijswater.
2. Keer het kompres ondersteboven om de inlaatklep af te sluiten. Verwijder overtollig water van de klep.
3. Het koudekompres is klaar voor gebruik. U kunt het kompres lichtjes masseren om de koude gel te verdelen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Als de inlaatklep niet helemaal leeg is, kan er een kleine hoeveelheid water/gel uit lekken. Een oververhit kompres kan barsten – let goed op wanneer u het kompres uit de magnetron/incubator haalt. De temperatuur van het kompres kan nog lichtelijk stijgen nadat de opwarming is beëindigd. Omdat er een verhoogd risico is bij gebruik van het product wanneer de temperatuur tot 45 graden Celsius stijgt, kleurt de warmte-indicator rood. De warmte-indicator is louter een extra indicatieve voorzorgsmaatregel tegen onverantwoord gebruik. Het kussen en de gel kunnen te warm worden voor het gewenste gebruik – zelfs als de indicator nog niet rood is geworden. Waak ervoor om het kussen te allen tijde met veel zorg te behandelen. Een kussen dat te warm of te koud is kan verwondingen op de huid en onderliggende weefsels veroorzaken. Let vooral goed op bij het gebruik bij patiënten met een verminderde sensitiviteit. Mensen die aan diabetes lijden en mensen met een slechte bloedsomloop mogen warmtetherapie slechts gebruiken na overleg met een arts. De huid van kinderen, ouderen en zwangere vrouwen kan ook bijzonder gevoelig zijn en supervisie wordt hierbij aangeraden. Het kompres is **UITSLUITEND** bedoeld voor uitwendig gebruik. Als het kompres beschadigd is, moet het onmiddellijk worden weggegooid.

ADVIES:

Elke magnetron werkt anders. Wij raden daarom aan om CURAPAX met tussenposen van bijv. 20 seconden te verwarmen tot u een duidelijker beeld heeft van wanneer het product in uw specifieke magnetron de gewenste temperatuur heeft bereikt.

CURAPAX® BEVAT:

PE, PA, PP en superabsorberende polymere (SAP). CURAPAX bevat geen PVC en geen Latex. De gecreëerde gel is niet-toxisch, risicovrij en oplosbaar in zout water. Vermijd het binnenkrijgen van de gel. Raadpleeg een arts als u de gel binnenkrijgt. CURAPAX® is een niet-toxisch wegwerpproduct dat met het reguliere huishoudafval kan worden weggegooid.