

CURAPAX®

BRUKSANVISNING



Läs alltid
instruktioner innan
användning



Fyll kudden
med vatten



Vänd kudden
upp och ner och
skaka försiktigt



Värm i
mikrovågsugn



Om indikatorn visar
rött, kan kudden
vara för varm för
användning

VÄRMEKUDDE:

1. Fyll påsen helt med vatten.
2. Vänd påsen upp och ner för att låsa påfyllningsventilen. Håll ut det överblivna vattnet från påfyllningsventilen.
3. Värm kudden i mikrovågsugn eller värmeskåp tills den önskade temperaturen uppnås
4. Värmekudden är klar att använda. Kläm lite på kudden för att fördela den varma gelen

KYLKUDDE:

1. Fyll påsen helt med vatten.
2. Vänd påsen upp och ner för att låsa påfyllningsventilen. Håll ut det överblivna vattnet från påfyllningsventilen.
3. Kyl kudden i ett kylskåp (1 till 2 timmar) tills den önskade temperaturen uppnås
4. Kylkudden är klar att använda. Kläm lite på kudden för att fördela den kalla gelen

OMEDELBAR VÄRMEKUDDE:

1. Fyll påsen helt med varmt vatten, som har önskad temperatur.
2. Vänd påsen upp och ner för att låsa påfyllningsventilen. Håll ut det överblivna vattnet från påfyllningsventilen.
3. Värmekudden är klar att använda. Kläm lite på kudden för att fördela den varma gelen.

OMEDELBAR KYLKUDDE:

1. Fyll påsen helt med kallt vatten eller isvatten.
2. Vänd påsen upp och ner för att låsa påfyllningsventilen. Håll ut det överblivna vattnet från påfyllningsventilen.
3. Kylkudden är klar att använda. Kläm lite på kudden för att fördela den kalla gelen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Om påfyllningsventilen inte blev helt tömd, kan det rinna ut lite varmt vatten/gel. En överhettad kudde kan brista - tag därför försiktigt ut kudden ur mikrovågsugnen/värmeskåpet. Temperaturen i kudden kan fortsätta att stiga något efter uppvärmning. Eftersom det är en ökad risk att använda produkten när temperaturen nått 45 grader celcius blir värmeindikatorn röd. Värmeindikatorn är enbart en extra vägledande försiktighetsåtgärd mot skadlig användning. Kudden och gelen kan vara för varm för användning även om inte indikatorn blivit röd. Vänligen hantera alltid kudden med försiktighet vid alla tillfällen. En kudde som är för varm eller för kall kan orsaka skador på huden och underliggande vävnad. Var särskilt försiktig vid användning på patienter med nedsatt känslighet. Personer som lider av diabetes och personer med dålig cirkulation bör använda värmeterapi först efter samråd med läkare. Tänk på att huden på barn, äldre och gravida kvinnor kan vara särskilt känslig varför övervakning rekommenderas. Förpackningen är endast för utvärtes bruk. Om förpackningen är skadad måste den kasseras omedelbart.

REKOMENDATION:

Varje mikrovågsugn uppför sig annorlunda. Därför rekommenderar vi dig att värma CURAPAX med intervall av t.ex. 20 sekunder tills du har fått en mer exakt känsla för när produkten når den önskade temperaturen i just din mikrovågsugn

CURAPAX® INNEHÅLLER:

PE, PA, PP och super absorberent polymer (SAP). CURAPAX är både PVC och Latex fri. Gelen som bildas är inte giftig, risk fri för huden och kan upplösas i saltvatten. Undvik intag av gelen. Kontakta läkare om gelen förtärs. CURAPAX® är en giftfri engångsprodukt som kan slängas bland hushållsavfallet.